

## Quattro™ Air – Komponentenkarte



Quattro Air Kopfband  
**62757 Small**  
**62756 Standard**



Quattro Air *for Her* Kopfband  
**62758 Small**  
**62759 Standard**



Kniestück mit Entriegelungsglaschen  
**62762**



Maskenrahmen  
**62760 (XS/S)**  
**62761 (M/L)**



Maskenkissen  
**62736 (XS)**  
**62737 (S)**  
**62738 (M)**  
**62739 (L)**

### Artikelnummern

Quattro Air Maskensystem Small	62705
Quattro Air Maskensystem Medium	62706
Quattro Air Maskensystem Large	62707
Quattro Air <i>for Her</i> Maskensystem Extra Small	62743
Quattro Air <i>for Her</i> Maskensystem Small	62744
Quattro Air <i>for Her</i> Maskensystem Medium	62745

**Quattro™ Air**  
**Quattro™ Air *for Her***  
 FULL FACE MASKE

## Quattro™ Air – Anpassungsleitfaden



- Nehmen Sie das Kniestück von der Maske ab, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken.
- Ziehen Sie das Kopfband mit geöffneten unteren Kopfbändern über den Kopf.



- Ziehen Sie die beiden Bänder des oberen Kopfbands gleichmäßig an, bis die Maske fest sitzt.



- Führen Sie die unteren Kopfbänder unter Ihren Ohren entlang und schieben Sie sie über die Aufnahmen am Maskenrahmen.



- Ziehen Sie die unteren Kopfbänder gleichmäßig an, bis die Maske fest sitzt.
- Die Maske sollte fest, aber bequem und sicher sitzen.
- Nicht zu fest anziehen!



- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch des Geräts.
- Bringen Sie das Kniestück an der Maske an, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken und das Kniestück in den Maskenkörper drücken.
- Schalten Sie das Gerät ein.



- Öffnen Sie die oberen Klettverschlüsse und ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis sie bequem und sicher sitzen. Schließen Sie die Klettverschlüsse in der gewählten Position.
- Wiederholen Sie den Schritt für die unteren Kopfbänder
- Ihre Maske ist nun gebrauchsfertig.



Quattro Air for Her ist so gestaltet, dass die Haare über oder unter dem Kopfband getragen werden können.

**Quattro™ Air**  
**Quattro™ Air for Her**  
FULL FACE MASKE

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Quattro Air Full Face Maske.

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16, 82152 Martinsried, Tel 089 9901-00, Fax 089 9901-1055, E-Mail reception@resmed.de