


MicroDrop[®] HygieneBox

Desinfektion und Aufbewahrung von Zubehör

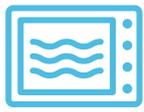

Für die
MIKROWELLE



Desinfektion mit Desinfektionsmittel



Passend für alle Verneblerzubehörteile



Desinfektion in der Mikrowelle



Für weiteres Zubehör geeignet
(Schnuller, Beißringe, Nasenduschen, etc.)

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop [®] HygieneBox	16686318	M53600-00100


HygieneBox mit BioCote®

Antibakterielle Beschichtung für sichere Aufbewahrung



Boxen mit Beschichtung

Auf einer BioCote®-geschützten Oberfläche können die Bakterien nicht überleben. Die rote Färbung zeigt die abgetöteten Bakterien.

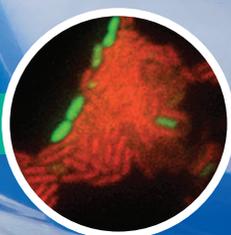

Boxen ohne Beschichtung

Auf einer ungeschützten Oberfläche beginnen die Bakterien zu wachsen und sich zu vermehren. Die grüne Färbung zeigt lebende Bakterien.

DESINFEKTION MIT DESINFEKTIONS-LÖSUNG



Bei der Desinfektion mit der chemischen Methode können Sie jedes mitgelieferte Zubehör mit Ausnahme des PVC Schlauchs einlegen.



Legen Sie das Zubehör in die **MicroDrop® HygieneBox**. Mischen Sie 1 Liter Desinfektionslösung gemäß den Anweisungen des Herstellers.



Füllen Sie die **MicroDrop® HygieneBox**, bis die Lösung das Zubehör bedeckt.



Lassen Sie die Desinfektionslösung, wie in den Anweisungen des Herstellers angegeben, wirken.



Drehen Sie nach Ablauf der Zeit die **MicroDrop® HygieneBox** um und lassen Sie die Flüssigkeit ablaufen. Entfernen Sie dann das Zubehör, spülen Sie es ab (wie vom Hersteller des Desinfektionsmittels empfohlen) und trocknen Sie es, ohne es abzureiben. Die Box kann anschließend als Aufbewahrungsbox genutzt werden.

DESINFEKTION IN DER MIKROWELLE



Bei der Desinfektion in einer Mikrowelle können Sie jedes mitgelieferte Zubehör mit Ausnahme des PVC Schlauchs einlegen.



Füllen Sie die **MicroDrop® HygieneBox** mit 100 ml Trinkwasser (bis zur Fülllinie). Für eine bessere Reinigung empfehlen wir die Verwendung von demineralisiertem Wasser. Legen Sie dann das Zubehör ein und schließen Sie den Deckel.



Stellen Sie die **MicroDrop® HygieneBox** in die Mikrowelle und stellen Sie diese gemäß den angegebenen Zeiten und Watt-Zahlen ein.



Warten Sie nach dem Erhitzen einige Minuten, bevor Sie die **MicroDrop® HygieneBox** aus der Mikrowelle nehmen, um die Außenflächen abkühlen zu lassen. **WARNUNG: Verbrennungsgefahr!**



Stellen Sie dann die **MicroDrop® HygieneBox** auf die Spüle oder auf eine saugfähige Oberfläche. Drehen Sie sie um und lassen Sie das heiße Wasser ablaufen. Entfernen Sie dann das Zubehör und trocknen Sie es, ohne es zu reiben. Die Box kann anschließend als Aufbewahrungsbox genutzt werden.