

**F&P** Brevida™



# NASALKISSENMASKE

**Entwickelt für  
Zuverlässigkeit.  
Geschaffen für Komfort.**

**NEU**

Das Vertrauen der Patienten ist von wesentlicher Bedeutung bei der CPAP-Therapie und das Vertrauen beginnt mit einer Maske, die passt und bequem ist.



# F&P Brevida™ Hauptmerkmale und Vorteile

## Verstellbares Kopfband

Verstellbares Kopfband sorgt für einen sicheren Sitz während des Schlafes.

## AirPillow™ Dichtung

Das innovative AirPillow™ bläst sich auf und bildet eine sanfte und wirksame Abdichtung.



## VisiBlue™

Blaue Markierungen, die in die wesentlichen Komponenten der Maske eingebettet sind, helfen den Patienten bei der täglichen Anwendung der Maske.

## Waschbarer Luftverteiler

Der Luftverteiler, der Geräusche und Luftzug reduziert, ist waschbar und langlebig.



# Die innovative F&P Brevida™ AirPillow™ Dichtung

## Zwei Dichtungsgrößen

Extralein-Klein und Mittel-Groß.

## Besonders dünne, weiche Dichtung

Auflagenbereich aus besonders dünnem (0,25 mm), weichem Silikon ermöglicht eine sanfte Abdichtung.

## Vielseitige Kissen

Vielseitige Kissen geometrie für eine Vielzahl von Nasenlochgrößen.

## Stabilisierende Seitenflügel

Seitenflügel verringern die Wahrscheinlichkeit eines Verschiebens der Auflage während des Schlafens.




## Eine sanfte, weiche Dichtung

Die AirPillow™ Dichtung bläst sich auf und bildet ein sanftes „Luftkissen“, das den Bereich in der Nase und um die Nase abdichtet.


### F&P AirPillow™ Nasalkissendichtung

Dichtet in und um die Nase ab

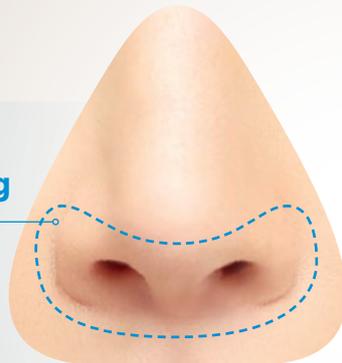

### Traditionelle Nasalkissendichtung

Dichtet direkt in den Nasenlöchern ab

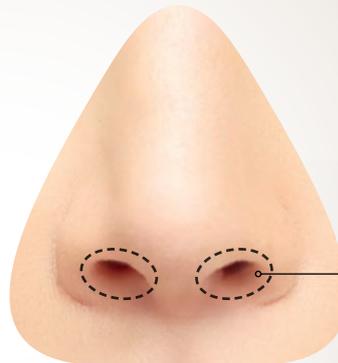

# Anpassen der F&P Brevida™



01

**Schritt 1.**  
**Halten Sie die Silikondichtung von Ihrer Nase weg** und breiten Sie mit den Fingern vorsichtig die weichen Seitenflügel der Silikondichtung aus. Führen Sie anschließend die beiden Öffnungen in Ihre Nasenlöcher ein.



02

**Schritt 2.**  
**Halten Sie den Maskenrahmen in der einen Hand** und ziehen Sie das Kopfband mit der anderen Hand über den Kopf, wobei Sie die Bänder oberhalb der Ohren positionieren, wie es auf den Abbildungen zur Anpassung der Maske oben gezeigt wird.



03

**Schritt 3.**  
**Ziehen Sie die Kopfbänder** an den Seiten vorsichtig fest oder lockern Sie sie, bis eine angenehme Abdichtung erreicht ist.

## BESTELLNUMMERN FÜR NORDAMERIKA/ASIEN-PAZIFIK

MASKEN	400BRE114	Brevida Dichtung Mittel-Groß (50 Stück)
BREISA Brevida Extraklein-Klein (eine Dichtung XS-S)	400BRE120	Brevida Kopfband
BREIMA Brevida Mittel-Groß (eine Dichtung M-L)	400BRE151	Brevida Kopfband-Clips (10 Stück)
BREISMA Brevida XS-S und M-L (zwei Dichtungen)	400BRE161	Brevida Ausatemluft-Verteiler (10 Stück)
	400BRE171	Brevida Winkelstück
	400FPH241	F&P Drehgelenk 2
<b>ERSATZTEILE</b>		
400BRE111 Brevida Dichtung Extraklein-Klein	400BRE131	Brevida Maske ohne Kopfbd. XS-S
400BRE112 Brevida Dichtung Mittel-Groß	400BRE132	Brevida Maske ohne Kopfbd. M-L
400BRE113 Brevida Dichtung Extraklein-Klein (50 Stück)		

## BESTELLNUMMERN FÜR EUROPA/AFRIKA/SÜDAMERIKA

MASKEN	400BRE114	Brevida Dichtung Mittel-Groß (50 Stück)
BREISU Brevida Extraklein-Klein (eine Dichtung XS-S)	400BRE120	Brevida Kopfband
BREIMU Brevida Mittel-Groß (eine Dichtung M-L)	400BRE151	Brevida Kopfband-Clips (10 Stück)
BREISMU Brevida XS-S und M-L (zwei Dichtungen)	400BRE161	Brevida Ausatemluft-Verteiler (10 Stück)
	400BRE171	Brevida Winkelstück
	400FPH241	F&P Drehgelenk 2
<b>ERSATZTEILE</b>		
400BRE111 Brevida Dichtung Extraklein-Klein		
400BRE112 Brevida Dichtung Mittel-Groß		
400BRE113 Brevida Dichtung Extraklein-Klein (50 Stück)		