

---

# Gebrauchsanweisung Wundgel

---

**Medizinische Indikationen** Gebrauchsfertiges Hydrogel zur schmerzarmen Anwendung bei Wunden und gereizter Haut auch im Rahmen der Sauerstoff- und Beatmungstherapie.  
Es hält die Wunde feucht, bildet einen Schutzfilm und fördert so die Wundheilung.  
Das Wundgel dient der langfristigen Befeuchtung und Feuchthaltung von Wunden, formt ein ideales Wundheilungsmilieu und unterstützt so den natürlichen Wundheilungsprozess.  
Wundgerüche werden durch den Einsatz des Wundgels schnell und zuverlässig eliminiert.

**Hinweise zur Anwendung** Vor der ersten Anwendung und beim Verbandwechsel empfiehlt sich die Wunde zunächst zu reinigen um Exsudat, fibrinoide Ablagerungen und sonstige Verunreinigungen zu entfernen.  
Mit dem Wundgel die Wundoberfläche immer großzügig bedecken. Zum Schutz die Wunde verbinden.  
Das Wundgel kann in Kombination mit Kompressen, Pflastern und anderen Verbandmitteln verwendet werden. Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung.  
Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Beschaffenheit der Wunde ab und ist der jeweiligen Wundsituation anzupassen.  
Ein leichter Chlorgeruch ist ein Zeichen für die Aktivität des Konservierungssystems. Aus hygienischen Gründen sollte das Wundgel dennoch nur von einem Patienten angewendet werden.  
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten.  
Die Anwendung des Wundgels ist nicht reizend, nicht irritierend und schmerzarm.

**Kontraindikationen/Anwendungseinschränkungen** Das Wundgel sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden.  
Nur zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden.  
Verwenden Sie das Wundgel nicht auf blutenden oder stark nässenden Wunden.  
Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden.  
Nicht gleichzeitig mit Chlorhexidin haltigen Produkten anwenden.  
Zur Anwendung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und bei Kindern unter zwei Jahren fragen Sie vorher Ihren Arzt oder Apotheker.  
Bei Kindern bis 12 Jahren sollte die Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.  
Bei Rötung, Schwellung oder Schmerzen im Wundbereich oder wenn sich der Zustand der Wunde nicht innerhalb weniger Tage verbessert, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Sicherheitshinweise**

- Nicht schlucken.
- Augenkontakt vermeiden.
- Vor Kindern sicher aufbewahren.
- Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden.
- Die Produkte nur bis zu den auf der Flasche angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen verwenden.

# Gebrauchsanweisung Wundgel

Vorgesehene Patientengruppe	Patienten mit akuten und chronischen Wunden, alle Altersgruppen, geschlechtsunspezifisch
Vorgesehene Körperteile	Verletzte Haut oder Schleimhaut, ausgenommen sind blutende, stark nässende Wunden und Körperöffnungen
Vorgesehene Anwender	Klinikbereich: Ärzte und Pflegepersonal Home Care Bereich: Pflegepersonal, Patient, pflegende Angehörige
Vorgesehene Gebrauchsumgebung	Helle, saubere Umgebung
Vorgesehene Dauer der Anwendung	Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Rückstände des Wundgels können in der Wunde verbleiben. Als Mehrdosenbehältnis ist das Wundgel mit NaOCl/HOCl konserviert. Dies ermöglicht die Anbruchstabilität und Verwendung des Produktes über 12 Wochen hinweg.
Inhaltsstoffe	Aqua, <0,06% Natriumhypochlorit/hypochlorige Säure, Lithium-Magnesium-Natrium-Silikat



**Hersteller:**  
Prontomed GmbH  
Am Bahndamm 70  
D-32120 Hiddenhausen



Gebrauchsanweisung  
beachten




Artikelnummer



Vor Sonneneinstrahlung  
schützen



Außerhalb der Reichweite  
von Kindern aufbewahren

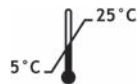

Temperaturgrenzwert

