


Übersicht LC-Display

Das Display informiert Sie über folgende Geräteeinstellungen:

- 1 Anzeige des Therapiedrucks
- 2 Anzeige des Rampenfortschritts (bei eingestellter Rampe)
- 3 Verbleibende Rampenzeit (bei eingestellter Rampe)
- 4 Ladezustand des Akkus (falls vorhanden)
- 5 Anzeige der AC-Stromversorgung (falls angeschlossen)
- 6 Allgemeine Statusanzeige
- 7 Störungsanzeige

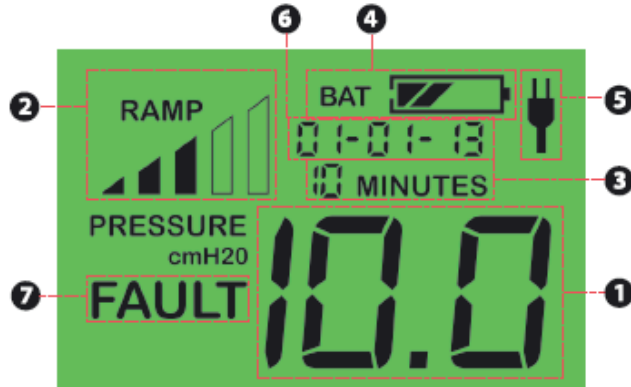

Nähere Angaben enthält die Gebrauchsanweisung des Z1.

Wichtig:

Das Z1-Display zeigt „Reminder“ an, wenn eine Luftleckage zwischen dem Z1-Luftauslass und der Maske erkannt wird. Die Anzeige erscheint ebenfalls, wenn die Maske nicht richtig sitzt. Diese Anzeige sollte erlöschen, wenn alle Anschlüsse sicher sind, die Maske ordnungsgemäß aufgesetzt und die Therapie gestartet wurde.

Verbinden Sie den optionalen Akkuträger „PowerShell“ kabellos mit Ihrem Z1:

1. Schieben Sie den Akku in das untere Fach des PowerShell bis den Einsatz hörbar einrastet.



2. Schieben Sie das Z1 in das obere Fach des PowerShell. Ein Klicken signalisiert Ihnen, dass es eingerastet ist. Das Z1 schaltet sich im Standby-Modus ein und zeigt an.



Hinweis für die Nutzung des optionalen Akkuträgers „PowerShell“ & Extended Life Battery: Wir empfehlen, den Akku vor jedem Gebrauch vollständig zu laden.

Wichtig: Nehmen Sie den Akku aus der PowerShell, wenn Sie das Gerät nicht mit PowerShell benutzen oder den Akku laden. Andernfalls führt der Stromverbrauch von Z1 und PowerShell dazu, dass sich der Akku innerhalb von 2-3 Tagen vollständig entlädt.

BREAS

BREAS Medical GmbH
Bahnhofstr. 26
82211 Herrsching

BreasGmbH@breas.com | 08152 37 210

Kurzanleitung

Dok. De D-1



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung für das Z1-CPAP bzw. Z1-Auto.

Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Z1™ auto



Um Ihr Z1 in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie nachstehend beschrieben vor.


1. Packen Sie den Filter aus. Setzen Sie den Filter in die Endkappe ein (siehe Abb.), sodass die gerundete Seite des Filters in die Endkappe passt. Der Filter muss alle Öffnungen der Endkappe abdecken. Drücken Sie anschließend die Endkappe wieder auf das Z1.



2. Schließen Sie das eine Ende des CPAP-Schlauchs am runden Ende des Schlauchadapters an. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchadapters mit dem Anschluss des Z1 (siehe Abbildung). Schließen Sie das andere Ende des CPAP-Schlauchs an der Maske an. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse dicht sind und keine Luft austreten kann.



3. Schließen Sie die Stromversorgung (AC/DC-Adapter) wie abgebildet am Z1 und einer Steckdose an. Das Z1 schaltet sich im Standby-Modus ein und das Display zeigt 0.0 an. Das Z1-Display ist immer aktiv, sobald das Gerät mit Spannung versorgt wird.

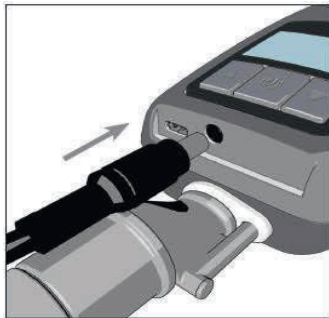

Tastenerklärung:

Aufwärts-Pfeil-Taste



Abwärts-Pfeil-Taste

Start-/Stopp Taste

4. Therapiedruck einstellen

Programmieren Sie den verordneten Therapie- bzw. Startdruck gemäß den Hinweisen in der Gebrauchsanweisung.

Z1-CPAP:

- a. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste bis die Anzeige blinkt
- b. Stellen Sie den Druck mit den Pfeiltasten ein
- c. Speichern Sie die Einstellungen mit der Start-/Stopp-Taste durch längeres Drücken, bis die Einstellung übernommen wird

Z1-Auto:

- a. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste bis die Anzeige blinkt
- b. Stellen Sie den Druck „APAP-HI“ mit den Pfeiltasten ein
- c. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Start-/Stopp-Taste. Stellen Sie den Druck „APAP-LO“ mit den Pfeiltasten ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Start-/Stopp-Taste, bis die Einstellung übernommen wird.

5. Rampe einstellen

- a. Drücken Sie die Aufwärts-Pfeiltaste bis die Anzeige blinkt
- b. Erhöhen oder senken Sie den Wert mit den Pfeiltasten
- c. Speichern Sie den Wert mit der Start-/Stopp-Taste durch längeres Drücken, bis die Einstellung übernommen wird

6. Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste um mit der Therapie zu beginnen.

Wenn Sie die Taste erneut drücken, stoppen Sie die Therapie.



Weitere Einstellungen:

Z-Breathe® einstellen:

- a. Drücken Sie die beiden Pfeiltasten gleichzeitig bis die Anzeige blinkt
 - b. Wählen Sie den Modus mit einer der Pfeiltasten aus
- **CPAP 1 bzw. APAP 1:** für eine moderate Druckregelung

- **CPAP 2 bzw. APAP 2:** Standardeinstellung für eine mittlere Druckregelung
 - **CPAP 3 bzw. APAP 3:** für ein schnelle Druckregelung
- c. Speichern Sie die Einstellungen mit der Start-/Stopp-Taste durch längeres Drücken, bis die Einstellung übernommen wird

Hinweis für Z1-CPAP:

Die automatische Stopp-Funktion beendet die Therapie, wenn die Maske abgenommen wird oder das Gerät ein größeres Luft-Leck zwischen dem Z1-Auslass und der Maske feststellt. Die automatische Stopp-Funktion kann sich auch einschalten, wenn die Maske nicht richtig sitzt. Wenn alle Verbindungen korrekt sind, wird der automatische Stopp nicht aktiv.

Hinweis für Z1-Auto:

Die automatische Start-Stopp-Funktion startet das Gerät sobald Sie mit dem Atmen beginnen und stoppt die Therapie, wenn Sie die Maske absetzen oder das Gerät ein größeres Luft-Leck zwischen dem Z1-Auslass und der Maske feststellt. Die automatische Stoppfunktion kann sich auch einschalten, wenn die Maske nicht richtig sitzt. Wenn alle Verbindungen korrekt sind, wird der automatische Stopp nicht aktiv.

Auto Start/Stop einstellen:

- a. Drücken Sie beide Pfeiltasten gleichzeitig bis die Z-Breathe® Einstellung blinkt
 - b. Drücken und Halten Sie die Pfeiltasten noch einmal gleichzeitig bis „A OFF-ON“ blinkt
- mit der Abwärts-Pfeiltaste schalten Sie die Automatik aus
 - mit der Aufwärts-Pfeiltaste schalten Sie die Automatik ein
- c. Speichern Sie die Einstellungen mit der Start-/Stopp-Taste durch längeres Drücken, bis die Einstellung übernommen wird