



RC-PFLEGE® N (Nasen- und Rachenspray)

zur täglichen Anwendung in Nase und Rachen

Eine zunehmende Anzahl von Menschen leidet unter trockener, gereizter Nasen- und Rachenschleimhaut. Ursachen sind die allgemeine Luftverschmutzung, häufiger Aufenthalt an Orten mit geringer Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in geheizten oder klimatisierten Räumen, und/oder eine Langzeit-Sauerstofftherapie. Diese Faktoren – Luftverschmutzung, geringe Luftfeuchtigkeit und/oder die Langzeit-Sauerstofftherapie – bewirken ein Austrocknen der Nasen- und Rachenschleimhaut.

Die Filterfunktion der Nase, d. h. das Zurückhalten der in der Atemluft vorhandenen Partikel (Staub, Pollen, Allergene etc.), kann jedoch nur durch eine feuchte Nasenschleimhaut mit funktionierendem, gesundem Flimmerepithel optimal erfüllt werden. Um die Filter- und Schutzfunktion unserer Nase zu sichern, ist es wichtig, die Nasenschleimhaut intakt zu halten und vor dem Austrocknen zu schützen.

1. ZUSAMMENSETZUNG

RC-Pflege® N ist ein Nasen- und Rachenspray und enthält Natriumchlorid und 2% Dexpanthenol in isotoner, steriler Lösung ohne Konservierungsmittel.

RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray wird mittels eines mechanischen Pumpsystems zerstäubt und enthält somit kein inhalativ reizend wirkendes Treibgas. Das spezielle Sprühsystem enthält einen Sterilfilter, wodurch die Lösung auch nach wiederholter Anwendung steril bleibt. RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray kann daher bis zu dem auf der Packung angegebenen Datum verwendet werden. Durch den Sterilfilter kann auf ein Konservierungsmittel, das bei vielen Menschen allergische Reaktionen auslösen kann, verzichtet werden.

2. ANWENDUNGSGEBIETE

RC-Pflege® N wird angewendet:

- zur **Befeuchtung** der Nasen- und Rachenschleimhaut
- bei trockener Luft z. B. in beheizten oder klimatisierten Räumen
- bei Schnupfen
- für Redner oder Raucher zur **Reinigung** der Nasenhöhle von Staub, Pollen, Allergenen oder trockenen Krusten zur **Begleittherapie** von Schnupfen, Heuschnupfen und ganzjährig allergischem Schnupfen oder als Ergänzung zu herkömmlichen „Schnupfenmitteln“ (z. B. abschwellende Nasentropfen)
- bei trockenem Rachen

Es bestehen keine Bedenken gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit. RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray *mit Sterilfilter, ohne Konservierungsmittel* ist für jede Altersgruppe geeignet.

3. ANWENDUNG UND DOSIERUNG


Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut mehrmals täglich je 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Der Vorgang kann bei Bedarf ohne Bedenken beliebig oft wiederholt werden.

Zur Befeuchtung der Rachenschleimhaut sind mehrmals täglich einige Sprühstöße in den Rachen erforderlich.

Zur Reinigung der Nase mehrmals täglich 2-3 Sprühstöße in jedes Nasenloch sprühen.

Entfernen Sie die Schutzkappe vor der Anwendung und führen Sie einige Pumpvorgänge durch, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Nun ist das RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray anwendungsbereit.

Die Sprühflasche ist beim Sprühen möglichst in senkrechter Position zu halten, sodass das Ansaugrohr in die Flüssigkeit ragt. Falls die Funktionstüchtigkeit des Sprühkopfes beeinträchtigt ist, sollte der Pumpmechanismus mehrmals in senkrechter Stellung betätigt werden, bis der Sprühnebel wieder austritt. Nach der Anwendung den Nasenadapter abwischen und das Spray wieder mit der Schutzkappe verschließen.

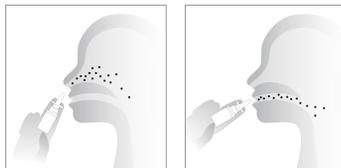

4. NASENHYGIENE BEI SÄUGLINGEN

Im Rahmen der täglichen Säuglingshygiene befeuchten und reinigen isotonische Kochsalzlösungen die Nase und stabilisieren so die normale Funktionsfähigkeit der Nasenschleimhaut. Eine tägliche Anwendung zum Zwecke der Befeuchtung und Reinigung der Nase ist unbedenklich und äußerst verträglich. Bei einem akuten Babyschnupfen kann RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray zur begleitenden Behandlung eingesetzt werden.

5. WARNHINWEISE

RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray sollte nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Inhaltsstoffe von RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray sind.

Bei verletzter Nase und nach Operationen im Nasenbereich ist RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt anzuwenden.

RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray ist ein Medizinprodukt! Wenn die Beschwerden sich nach mehrmaliger Behandlung mit RC-Pflege® N nicht bessern, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Anwendung von RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray ist unbedenklich und kann daher bei Bedarf über einen längeren Zeitraum erfolgen.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern sollte eine Sprühflasche jeweils nur von **einer** Person verwendet werden.

RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und steril mit einem speziellen Applikationssystem abgefüllt. Bei Manipulationen am Behältnis oder Applikationssystem darf RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray nicht mehr verwendet werden, da eine sichere Anwendung nicht mehr gewährleistet ist.

Bei gleichzeitiger Anwendung eines anderen lokal wirkenden Schnupfenmittels sollte RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray **vorher** angewendet werden.

6. PACKUNGSGRÖSSE

STERILE A

Flasche mit 20 ml steriler Lösung, inkl. Sprühaufsatz, 1 Sprühstoß = 0,14 ml Lösung

RC
MEDIZINTECHNIK

Hersteller:

MoNo chem-pharm
Produkte GmbH
Leystraße 129
A-1200 Wien

CE 0408

Alleinvertrieb Deutschland:

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Fon +49 26 02 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de

08/2014 RCPN-0020-BP-02

RC NASENCORNET^N
CORNET[®]



Freie Nase,
ohne Medikamente

Atemphysiotherapiegerät

Das RC-Cornet® N (Nasencornet) verschafft auf natürliche Weise eine freie Nase. Es wirkt langfristig abschwellend, schleimlösend und regenerierend.

PZN 08 862 327 www.cegla-shop.de

