

OXYTRAVEL™

Der Linde-Reiseservice
für Sauerstoffpatienten.

Linde: Living healthcare



Inhalt.

- 4 Unbeschwert reisen
- 6 Mit dem Auto unterwegs
- 8 Reisetankkonzept
- 10 Reisen mit Schiff, Zug und Flugzeug
- 12 Sauerstoffhotels
- 14 Empfehlung für die Reise
- 16 Preise für private Versorgung
- 18 Reiseorganisation
- 19 Kontakt

Erleben Sie mit unserem Sauerstoff-Reiseservice die Freiheit unbeschwerter Mobilität.

Mit OXYTRAVEL™, dem Reiseservice für Sauerstoffpatienten von Linde, stehen Ihnen viele Türen offen. Ganz gleich ob Wochenendbesuch bei den Kindern oder Freunden, Flugreise oder sogar Kreuzfahrt, wir unterstützen Sie. So steht einer erholsamen und unbeschwertem Reise nichts mehr im Weg.

Im folgenden Magazin möchten wir Ihnen unsere verschiedenen Services vorstellen und Sie mit wichtigen Informationen für die Reise versorgen.

Unser langjähriger Partner, das Reisebüro am Marienplatz in Wasserburg, steht Ihnen für Fragen rund um Ihre Reiseziele zur Verfügung.

Viel Spaß bei der Planung Ihrer nächsten Reise!

Wir wünschen Ihnen bereits jetzt einen wunderbaren, erholsamen Urlaub!

Ihr Team von Linde Healthcare

Unbeschwert reisen.



Unterwegs sein, Eindrücke sammeln, all das helfen wir Ihnen gerne zu ermöglichen.

Damit Ihre Reise entspannt und erholsam verläuft, gilt es aber vieles zu organisieren. Hierfür bitten wir Sie, sich bei Inlandsreisen mindestens 2 Wochen, bei Auslandsreisen 4-6 Wochen vor Abreise mit dem Reisebüro in Verbindung zu setzen.
Tel. (08071) 922860

Unbeschwert reisen

Urlaub, unterwegs sein, neue Eindrücke und Erholung können sich positiv auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit auswirken. Ihre Sauerstoffversorgung soll Ihnen bei der Erfüllung Ihres Reisetraums nicht im Wege stehen.

Ohne Zusatzkosten*: Professionelle Organisation einer 3-wöchigen Sauerstoffversorgung während der Urlaubsreise in Deutschland einmal pro Kalenderjahr in Kooperation mit einem spezialisierten Reisebüro.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Klärung, welche Leistungen in Ihrem Vertrag enthalten sind.

Ob mit Auto, Bus, Bahn, Schiff oder Flugzeug, wir organisieren zusammen mit unserem spezialisierten Partner-Reisebüro Ihre zuverlässige Sauerstoffversorgung. Für die Dauer der Reise können Sie bei Bedarf ein Sauerstoffversorgungssystem inklusive Zubehörpaket (siehe Seite 13) mieten. Bei innerdeutschen Reisen übernehmen wir bei Bedarf den Transport des Sauerstoffsystems und Befüllen der Flüssigsauerstoffbehälter vor Ort. Deutschlandweit, ohne Ausnahmen. Individuelle Details prüft gerne das Reisebüro mit Ihnen in einem Gespräch.

Nach Ihrer Reise übernehmen wir die Abholung und Reinigung des Geräts.

Genießen Sie einfach Ihren Urlaub.

Zuverlässiger Partner

Mit der Versorgung von Sauerstoffpatienten kennen wir uns bestens aus. Erstklassige Qualität und ein dichtes Liefernetz garantieren Ihre zuverlässige Versorgung.

*gilt für GKV-Versicherte; ausgenommen sind Inselversorgungen



Bitte beachten Sie bei der Wahl Ihres Reiseziels, dass ein klimatischer Wechsel (Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Höhenunterschiede) eine Belastung für Ihren Körper darstellen kann. Stellen Sie daher sicher, dass am Urlaubsort eine gute ärztliche Versorgung vorhanden ist und Sie ausreichend versichert sind.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere langjährige Erfahrung für mehr Freiheit, mehr Mobilität, mehr Lebensqualität.

Verwirklichen Sie Ihre Reiseträume in dem sicheren Wissen, dass Ihre Versorgung mit Sauerstoff dort sein wird, wo und wann Sie diese benötigen.

Seit dem Start unseres Reiseservices im Jahr 2002 haben schon Tausende von Patienten unseren Service für Reisen in über 30 Länder rund um den Globus genutzt.

Reisevorbereitung

Bitte planen Sie Ihre Urlaubsreise rechtzeitig, damit wir Ihre Versorgung sicherstellen können. Bei Inlandsreisen mindestens 2 Wochen und bei Auslandsreisen je nach Urlaubsziel 4-6 Wochen vor Abreise.

Bitte beachten Sie:

Nicht alle Kostenträger übernehmen die vollen Kosten für eine Urlaubsversorgung. Deshalb ist es wichtig, vorab die Kostensituation abzuklären. Wir helfen Ihnen dabei.

Mit dem Auto unterwegs.

Ihre Planungshilfe für eine Autoreise:

- Sauerstoffversorgung am Urlaubsort klären
- Reisebehälter/Geräte organisieren
- Wegstrecke inkl. Stau kalkulieren und mit Reichweite der Sauerstoffversorgung abgleichen
- Ausreichendes Verbrauchsmaterial (Nasenbrillen etc.) einpacken
- Klären, ob ausreichend Versicherungsschutz gegeben ist
- Ggf. Adapter einpacken

Reisen mit dem PKW.

Flüssigsauerstoff

Ihre Arzneimittel dürfen Sie auch im Fahrzeug mit sich führen. Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer sind jedoch ein paar Punkte zu beachten:

- Sauerstoff selbst ist nicht brennbar.
- Sauerstoff fördert Verbrennungsvorgänge – diese können explosionsartig ablaufen!
- Sauerstoff darf nicht mit fetthaltigen Substanzen wie Öl, Cremes oder Salben in Kontakt kommen, da es sonst zur Selbstentzündung kommen kann.
- Flüssiger Sauerstoff ist tiefkalt (-183 °C). Ein Kontakt mit der Haut führt zu Kälteverbrennungen.
- Gasförmiger Sauerstoff in Druckgasflaschen hat 200 bar Überdruck. Die Flaschen dürfen keiner Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden, da sonst der Druck ansteigen kann. Feuereinwirkung auf Flaschen bringt diese zum Bersten! Stellen Sie eine aufrechte Lagerung Ihrer Sauerstoffgeräte sicher.

So verhindern Sie eine Sauerstoff-Anreicherung im Fahrzeug

- Öffnen Sie für einige Zeit die Fenster/Türen Ihres Fahrzeugs bevor Sie elektrische Geräte (Lüfter etc.) im Fahrzeug einschalten. Dies gilt auch für das Starten des Fahrzeugs zu Fahrtbeginn und nach Pause.
- Bitte sorgen Sie immer, auch während der Fahrt, für eine ausreichende Belüftung des Fahrgastraums.

- Schalten Sie die Sauerstoffabgabe des Standgerätes unbedingt ab, wenn Sie dieses im Fahrzeug belassen und nicht anwesend sind.
- Je höher die Temperatur im Fahrzeug, desto höher ist die Eigenverdampfung des flüssigen Sauerstoffs.
- Wählen Sie ein Ihrer Fahrzeuggröße entsprechendes Standgerät (21, 31, 41 Liter), damit Sie Ihr Tragegerät noch im Fahrzeug befüllen können (ausreichende Innenhöhe).
- Gerätehöhen:
Standgerät:
21 Liter = 70 cm (42,64 kg)
31 Liter = 83 cm (56,15 kg)
41 Liter = 98 cm (73,92 kg)
Tragegerät:
1,2 Liter = 40 cm + jeweils ca. 10 cm für das Auf- und Absetzen

Konzentratoren

- Beachten Sie, dass mobile Konzentratoren mit verschiedenen Techniken ausgestattet sind. Es gibt Geräte, die sich im PKW beladen lassen. Nicht bei allen Geräten ist eine gleichzeitige Nutzung möglich.
- Achten Sie auf die angegebene Temperatur in der Bedienungsanleitung Ihres Konzentrators. Hier werden Maximal- und Minimaltemperaturen für Betrieb und Lagerung der Geräte angegeben.
- Klären Sie vorab mit ihrem Arzt, ob das jeweilige Gerät für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Die Geräte unterscheiden sich in Abgabemenge, Abgabearart und Akkulaufzeit.

Sie sind bei der Mitnahme von Arzneimitteln und Medizinprodukten verantwortlich für die ausreichende Sicherung im Fahrzeug

- Auf Grund der vielen verschiedenen Fahrzeugtypen kann an dieser Stelle keine Empfehlung gegeben werden, an welchen Punkten Sie diese in Ihrem Fahrzeug befestigen können.
- Verwenden Sie zur Sicherung bitte handelsübliche Zurrgurte.
- Die Gefäße (Kryo-Gefäße mit Fertigarzneimittel und Flaschen) müssen so in Ihrem PKW gesichert sein, dass ein Umfallen oder Verrutschen bei normalen Bedingungen nicht möglich ist.
- Kryo-Gefäße dürfen nur in aufrechter Position transportiert werden (Ausrichtungspfeile beachten).
- Flaschen dürfen liegend transportiert werden oder bei bis zu sechs 2,0-Liter-Flaschen in einer blauen „Linde-Transportkiste“.
- Achten Sie darauf Druckgasflaschen quer zur Fahrtrichtung oder stehend zu transportieren und gegen Rollen und Umfallen zu sichern. Transportieren Sie Gasflaschen, welche nicht in Verwendung sind, immer ohne angeschlossenen Druckminderer.

Reisetankkonzept.



Sauerstoffversorgung unterwegs.

Reisen und Mobilität wird für Linde-Sauerstoffpatienten noch einfacher. Sie sind mit dem Auto unterwegs und benötigen Sauerstoff? Kein Problem! Eine Betankung Ihres Reisevorratsbehälters ist entweder im Rahmen der Behältermiete an einer unserer Sauerstofftankstellen ohne Zusatzkosten oder mit Zuzahlung an einem individuell vereinbarten Treffpunkt möglich.

Miete eines Reisetanks

- Möchten Sie einen Reisevorratsbehälter für bis zu 4 Wochen mieten, so wenden Sie sich bitte an unser Reisebüro: Telefon (08071) 922860.*
- Eine Langzeitmiete von 3, 6 oder 12 Monaten können Sie über unser Servicetelefon (089) 37000-0 vereinbaren.

3 Monate: 270,00 Euro inkl. MwSt.

6 Monate: 416,69 Euro inkl. MwSt.

12 Monate: 637,50 Euro inkl. MwSt.

Anrufen – auftanken – weiterfahren

Befüllen Sie Ihren Reisevorratsbehälter an unseren 4 Sauerstofftankstellen in Deutschland:

- Vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin mit unserem Kundenservice unter Tel. (089) 37000-300 spätestens 2 Werktage (Mo–Fr) vor Abreise.
- Sie erhalten eine Bestätigung von uns per Telefon.
- Wir tanken Ihre Reisevorratsbehälter auf und Sie setzen Ihre Reise fort.

* Bei Anfrage wird die Verfügbarkeit geprüft.



Buchen Sie eine Befüllung an Ihrem Wunschort

Gerne befüllen wir Ihren Reisevorratsbehälter vor Abreise an Ihrer Heimatadresse, während der Reise am Urlaubsort (nur innerhalb Deutschlands) oder sogar an einem Treffpunkt unterwegs. Die Befüllung Ihres Reisevorratsbehälters im regulären Lieferrhythmus an Ihrer Heimatadresse ist sogar kostenfrei. Füllfahrten außerhalb des regulären Lieferrhythmus und an andere Adressen können Sie individuell buchen*. Diese kosten 86,90 Euro inkl. MwSt.

Für die Terminierung der Befüllung Ihres Reisevorratsbehälters melden Sie sich bitte spätestens zwei Werktage (Mo–Fr) vor der geplanten Abreise bei unserem Kundenservice. Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 07.30 bis 17.30 und Freitag von 07.30 bis 16.30 unter Tel. (089) 37000-300.

* Mo–Fr, innerhalb Deutschlands, Befüllung auf Inseln ausgeschlossen

Wichtig:

Eine Befüllung ist nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Es können im Rahmen der Reiseversorgung nur Reisebehälter befüllt werden.

Reisen mit Schiff, Zug und Flugzeug.

Ihre Planungshilfe für eine Zugreise:



- Berechnung der Wegstrecke von Start- zu Zielort inkl. möglicher Verspätungen
- Buchung Sitzplatz inkl. möglicher Stromversorgung
- Erkundigung einholen über mögl. Betreuungsservice durch Bahn (z. B. Einstieghilfe)
- Organisation O₂-Versorgung am Urlaubsort

Ihre Planungshilfe für eine Schiffsreise:

- Genehmigung für Mitnahme von O₂-Versorgung von der Reederei einholen
- Reisetauglichkeit von Arzt bestätigen lassen
- Medikamente und Notfallmedikamente in ausreichender Menge mitnehmen
- Klärung Stromversorgung und Spannung an Bord
- Organisation An- und Abreise
- Abklärung medizinische Versorgung an Bord

Ihre Planungshilfe für das Reisen mit dem Flugzeug:

- Reise-/Flugtauglichkeit, Demandfähigkeitstest durch den Arzt
- Anmeldung O₂ bei Fluggesellschaft – mindestens 6 Wochen vor Reisebeginn – Einholung des FAA und möglicher weiterer Formulare
- Genehmigung Fluggesellschaft zum Transport von O₂-Versorgung an Bord
- Sicherstellung Versorgung am Urlaubsort
- Planung und Packen von Verbrauchsmaterial (Nasenbrillen, Befeuchtung ...)
- Krankenkasse über geplante Reise informieren
- Medikamente und Notfallmedikamente für das Handgepäck zusammenstellen und Rezepte vom Arzt einholen

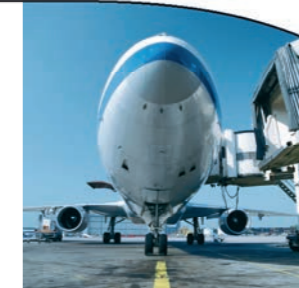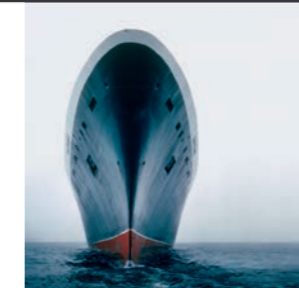

Zugreisen

- Reisen Sie immer in Nichtraucherabteilen.
- Füllen Sie die Behälter kurz vor der Abfahrt ganz auf.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gepäck sicher transportieren können.
- Legen Sie die Geräte nicht in die Gepäckablage.
- Lagern Sie die Geräte aufrecht und kippsicher.
- Lassen Sie Ihre Geräte niemals unbeaufsichtigt.
- Bedenken Sie, dass es nicht immer möglich ist, mobile Konzentratoren während der Zugfahrt zu laden.
- Nicht alle Sitzplätze verfügen über eine Steckdose. Erkundigen Sie sich frühzeitig!

Schiffsreisen

Die Schifffahrtsgesellschaften behandeln die Geräte als Güter, deshalb sind bei der Reservierung folgende Punkte zu beachten:

- Klären Sie bereits vor der Buchung, ob die Mitführung und Nutzung Ihres Sauerstoffgerätes an Bord gestattet ist.
- Holen Sie die Erlaubnis der Gesellschaft zur Einschiffung der Sauerstoffgeräte ein.
- Informieren Sie sich vor der Reise über die Einschiffung der Geräte und über die Hafenzufahrt zur Abgabe und Lagerung bei der Ankunft.
- Teilen Sie der Hafentour die benötigten Daten mit: z. B. Name, Anschrift und Telefonnummer.

- Die Mitnahme von Flüssigsauerstoff ist immer eine Einzelfallentscheidung der Reederei und wird leider häufig nicht gestattet.

Flugreisen

Flugtauglichkeit

International gelten unterschiedliche Richtlinien zur Beurteilung der Flugtauglichkeit. Viele Fluggesellschaften legen dazu eigene Kriterien fest. Die Europäische Fachgesellschaft für Lungenheilkunde (European Respiratory Society, ERS) schlägt z. B. die Mitnahme von Sauerstoff vor, wenn der zu erwartende Sauerstoffdruck im Blut (PaO₂) unter 55 mmHg liegt. Der flugmedizinische Dienst der Lufthansa fordert u. a. eine Vitalkapazität von mindestens 3 Litern und eine FEV₁ über 70 % des Sollwertes, eine Sauerstoffsättigung von mindestens 85 % oder einen Sauerstoffdruck im Blut (PaO₂) von mindestens 70 mmHg.

Im Flugzeug

Der Kabineninnendruck entspricht während des Flugs einer Höhe von etwa 2.400 m über dem Meeresspiegel. Der Sauerstoffdruck ist vermindert, etwa so wie bei einem Aufenthalt in den Alpen. Außerdem wird die Umluft in der Flugzeugkabine angewärmt und ist sehr trocken. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 15 Prozent.

Gerätetransport

International gelten relativ einheitliche Richtlinien für die Mitnahme von Sauerstoff. Flüssigsauerstoff ist an Bord keiner

Fluggesellschaft erlaubt. Es werden teilweise noch GOX-Flaschen zu 2 Liter/200 bar akzeptiert sowie immer öfter auch tragbare Konzentratoren. Bitte beachten Sie, dass nicht alle tragbaren Konzentratoren akzeptiert werden. Die mobilen Konzentratoren, die wir einsetzen, stellen in der Regel jedoch kein Problem dar. Bitte erkundigen Sie sich in jedem Fall über die individuellen Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft. Die Akkulaufzeit muss mindestens 150 % der erwarteten Flugzeit betragen. Vor Reiseantritt müssen Sie eine Bestätigung über die FAA-Zulassung des zu transportierenden Gerätes einreichen. Diese erhalten Sie über unser Partner-Reisebüro oder den Lindenkundenservice.

Auch hier gilt:

Vor Festbuchung muss die Mitnahme und Nutzung des jeweiligen Sauerstoffgerätes bei der Fluggesellschaft beantragt werden. Dazu benötigen Sie in den meisten Fällen eine generelle Flugtauglichkeitserklärung Ihres behandelnden Arztes, Ihre Blutgaswerte und kurz vor Abflug (unter 7 Tage vor Abreise ausgestellt) eine erneute Flugtauglichkeitsbescheinigung des Arztes für den Flug.

Sauerstoffhotels.

Das Reisen mit Sauerstoff birgt vielfältige Herausforderungen. Um Ihre Reise noch unkomplizierter und erholsamer zu gestalten, haben wir gemeinsam mit unserem Partner-Reisebüro und Patienten Hotels ermittelt, welche im Umgang mit Sauerstoff routiniert sind und gezielt auf Ihre Bedürfnisse reagieren können.

Sauerstoffhotels kennen die tagtäglichen Herausforderungen von Sauerstoffpatienten. Zahlreiche Patienten haben in den Sauerstoff-Hotels gute Erfahrungen im Umgang mit Ihrer Erkrankung gesammelt. Ebenso ist sichergestellt, dass die Lieferung von Sauerstoff als auch der Betrieb von Konzentratoren kein Problem darstellt.

Die meisten Sauerstoffhotels sind in unmittelbarer Nähe von spezialisierten Ärzten, was zusätzliche Sicherheit vermittelt.

Eine vollständige Liste unserer bekannten Sauerstoff-Hotels finden Sie ab sofort auch auf unserer Homepage unter: www.linde-healthcare.de

Wir bauen unser Angebot an Sauerstoffhotels für Sie kontinuierlich aus und stellen interessante, neue Reisemöglichkeiten innerhalb Deutschlands in unserem regelmäßig erscheinenden Kundenmagazin vor.

Empfehlung für Ihre Reise.



Auch erhältlich im
Elementar-Webshop
www.linde-elementar.de

Eclipse 5. Der transportable Konzentrator für Ihre Reise

Mit dem Eclipse sind Sie rund um die Uhr versorgt. Tagsüber profitieren Sie im Demand-Modus von großer Akku-Reichweite, während Sie nachts auf Dauerfluss umstellen können.

Der Eclipse Sauerstoffkonzentrator leistet bei Dauerfloweinstellung einen Fluss von 3 Litern Sauerstoff pro Minute. Bei Atemtriggerung kann das Gerät mehr als 100 ml Bolus leisten. Je höher die Flowleistung des Gerätes eingestellt ist, desto kürzer ist die Laufzeit des Akkus.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 5,4 Stunden bietet der Eclipse lange und leistungsstarke Mobilität.

Die stabilen Rollen des Konzentrators geben Ihnen maximale Mobilität und ermöglichen einen unkomplizierten Transport am Urlaubsort.



INOGEN ONE G5. Mobiler Sauerstoffkonzentrator

Ausgestattet mit einem austauschbaren Akku und einem Caddy ist der INOGEN ONE G5 Sauerstoffkonzentrator die Lösung für mobile Patienten, denn er verbindet die Vorteile eines stationären mit denen eines mobilen Gerätes. Da hier der Sauerstoff aber nur pro Atemzug abgegeben wird, sollte hier vorab dringend der Arzt befragt und ein Test durchgeführt werden, ob ein Demand-System für Sie geeignet ist.

- Ideal für Reisen, da der INOGEN ONE G5 von den meisten Fluggesellschaften zugelassen ist
- Sehr leise mit nur 37 dB bei Einstellung 2
- Lange Akkulaufzeit von bis zu 6,5 Stunden (bei Einstellung 2 und neuen 8 Zell Akkus)
- Klein und handlich bei einem Gewicht von 2,2 kg (inkl. 8 Zell Akku)
- Bis zu 13 Stunden Mobilität mit dem 16 Zell Akku

Für Ihre Reise stellen wir Ihnen gerne ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Sauerstoffsystem zur Verfügung:

- Sauerstoffversorgungssystem inkl. Zubehörpaket für die Dauer der Reise.
- Transport des Sauerstoffsystems zum Reiseziel.
- Befüllen des Standbehälters am Reiseziel (außerhalb des Wohnorts der Patientin/des Patienten).
- Abholen, reinigen und wiederaufbereiten der Geräte.

Die Sauerstoffreiseversorgung ist auf innerdeutsche Zielorte begrenzt. Für Auslandsreisen berät Sie gerne unser Partnerreisebüro.

1 Sauerstoffsystem inkl. Zubehör beinhaltet:

LOX (Flüssigsauerstoff)

- Je 1 Standbehälter und 1 Tragegerät
- 2 Nasenbrillen, 1 Sauerstoffschlauch 10 m
- 1 Schlauchverbinder und 1 Überwurfmutter mit Anschlussstülle
- 1 Sterilwasser 500 ml

COX (Konzentratoren)

- 1 Sauerstoffkonzentrator
- 2 Nasenbrillen, 1 Sauerstoffschlauch 10 m
- 1 Schlauchverbinder und 1 Überwurfmutter mit Anschlussstülle
- 1 Perlanfeuchter oder Sterilwasser 500 ml

GOX (Druckgasflaschen 10 Liter)

- Druckgasflasche(n)
- 1 Druckminderer
- 2 Nasenbrillen, 1 Sauerstoffschlauch 10 m
- 1 Schlauchverbinder und 1 Überwurfmutter für Druckminderer
- 1 Aufstellhalter für Flaschen (nur bei 5 Liter- bzw. 10 Liter-Flaschen)

GOX Reiseset 2 Liter mobil

- Druckgasflasche(n)
- 1 Tragetasche
- 2 Nasenbrillen
- 1 Druckminderer
- 1 Überwurfmutter für Druckminderer
- 1 Demandsystem Oxytron 3 o. Ä. (nur mit ärztlicher Verordnung)

Mobile Konzentratoren

- 1 portabler Sauerstoffkonzentrator
- 2 Akkus für die Mobilität
- 1 Caddy oder Tragetasche, je nach Modell
- 1 Netzteil für Stromversorgung zu Hause
- 1 PKW Gleichspannungsadapter
- 1 Lufteinlassfilter (je nach Modell)
- 2 Nasenbrillen
- 1 Gebrauchsanweisung

Homefill Flaschenfüllsystem

- 1 Sauerstoffkonzentrator
- 1 Sauerstoffflasche 1,7 Liter (bei Demandfähigkeit mit Demandsystem)
- 1 Perlanfeuchter (0-10 lpm)
- 1 Anschlussstülle Überwurf UNF 9/16
- 2 Standard-Nasenbrillen für Erwachsene, Kleinkinder oder Babys
- 1 Verbindungsschlauch
- 1 Schlauchverbinder
- 1 Sterilwasser

Schauen Sie in unserem Webshop
www.linde-healthcare-elementar.de
nach unseren speziellen Reiseangeboten!

Achtung: Bei Verlust oder Beschädigung des Geräts oder von Zubehör erfolgt eine Rechnungsstellung über den Wiederbeschaffungswert wie z. B. Netzteil, Druckminderer, Caddy, Akkus o. a.

Preise für private Versorgung.

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass eine Reparatur oder ein Austausch von Gerät oder Zubehör nicht sichergestellt werden kann, wenn Sie die Bundesrepublik Deutschland mit dem Gerät verlassen.

Bitte beachten Sie, dass Sie im Rahmen Ihrer Reise erhöhter Belastung oder Stresssituationen ausgesetzt sein können, die zum Beispiel aufgrund erhöhter Atemfrequenz den Sauerstoffverbrauch steigern. Entsprechend verringert sich die Laufzeit des Akkus bzw. kann die Funktionsfähigkeit des Gerätes eingeschränkt sein.

Findet die Reise mit einem reinen Demand-Gerät, z. B. dem Inogen One G3 statt, sollte vorher die Demandfähigkeit getestet sein. Beachten Sie hier vor allem die Nutzung während der Nacht. Vor Reiseantritt muss Ihr behandelnder

Arzt Ihre Reisetauglichkeit überprüfen und bestätigen. Sollte bislang noch kein demandfähiges Gerät genutzt werden, sollte unbedingt auch eine Überprüfung der Demandfähigkeit vor Reiseantritt erfolgen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie die Geräte in Betrieb nehmen.

Anmerkung zu Flüssigsauerstoff: Bitte beachten Sie, dass Sie einen Standbehälter, welcher kein Pi-Kennzeichen enthält, nicht ins Ausland befördern dürfen. Das Pi-Kennzeichen befindet sich auf dem Metallkörper des Behälters. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service.

Sauerstoff-Urlaubsversorgung ab 2021 für private Versorgung

Tarif (Bitte beachten Sie, dass für Urlaubsversorgungen mit Ihrer Krankenkasse separate Tarife vereinbart sein können.)

	Erstpauschale Zeitraum	Folgepauschale		
		brutto	brutto	
Flüssigsauerstoff*	2 Wochen	198,90 €	1 Woche 100,76 €	
Füllfahrt des eigenen Tanks Folgepauschale ab 3. Belieferung je Pauschale	je Befüllung	62,46 €	gilt nur für Kunden von Linde	
POC	2 Wochen	312,21 €	1 Woche	82,65 €
Homefill	2 Wochen	327,69 €	1 Woche	87,25 €
Standkonzentrator	2 Wochen	87,90 €	1 Woche	50,46 €
Miete Tragegerät zusätzlich	2 Wochen	103,99 €	1 Woche	22,61 €
Miete Standbehälter S21	2 Wochen	163,05 €	1 Woche	75,85 €
Druckgasflasche 2 Liter	2 Wochen	160,06 €	jede weitere Flasche 79 € netto	
Druckgasflasche 10 Liter	2 Wochen	192,19 €	jede weitere Flasche 89 € netto	

Inselversorgungen

Inselversorgung (Bei Rügen, Usedom und Fehmarn entfällt der Inselzuschlag)	217,62 €	pro Überfahrt
Versorgung auf einem Schiff (Befüllungen sind nur an deutschen Häfen möglich)	57,94 €	

Auslandsreisen

Auf Anfrage, wegen landesbezogenen Unterschieden und Transportmitteln

Besonderheiten

Reisen setzen sich immer aus der Erstpauschale (2 Wochen) und den jeweiligen Folgepauschalen (jeweils 1 Woche) zusammen. Bitte beachten Sie, dass bei Urlaubsversorgungen über die Krankenkasse separate Tarife gelten können. Sollten Sie planen, Ihre vom Kostenträger übernommene Reisezeit zu verlängern, berechnen wir den jeweiligen oben genannten Folgetarif. Bei langfristigen Mieten über 3 Monate bitten wir Sie, sich mit unserem Service-Center unter (089) 37000-300 in Verbindung zu setzen.

Bitte sprechen Sie vor jeder Reiseplanung mit Ihrem behandelnden Arzt, ob die von Ihnen gewünschte Versorgungsart in Frage kommt. Insbesondere bei geplanter Nutzung von mobilen Konzentratoren, ist eine vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt dringend zu empfehlen. Alle Geräte werden mit Werkseinstellungen ausgeliefert.

*max. 2 Befüllungsfahrten. Jede weitere Befüllung wird mit o.g. Folgepauschalen berechnet.

Genauere Informationen erhalten Sie im Reisebüro oder auf unserer Homepage www.linde-healthcare.de.

Reiseorganisation.

Folgende Angaben benötigen wir für Ihre Reiseversorgung:

- Heimatadresse und Urlaubsadresse
- Linde-Kundennummer
- Aktuelle Verordnung mit Angabe des O₂-Bedarfs in l/min und Stunden täglich
- An- und Abreisedatum
- Ggf. ärztliche Bescheinigung, wenn die Urlaubsversorgung nicht der generellen Versorgung entspricht
- Ggf. Flugtauglichkeitsbescheinigung des Arztes
- Rezept für Urlaubsversorgung für Ihre Krankenkasse

Kontakt. Unser spezialisiertes Partner-Reisebüro.

Reisebüro am Marienplatz

Seit mehr als 15 Jahren plant und organisiert das Reisebüro am Marienplatz Reisen für Sauerstoffpatienten. Lassen Sie sich beraten, von der Wahl des geeigneten Reiseziels bis zur Buchung.

Reisebüro am Marienplatz
TUI TRAVELStar

Inh. Jutta Mauritz
Marienplatz 25
83512 Wasserburg

Sie erreichen unser Reisebüro

Montag – Donnerstag	9.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	9.00 – 13.00 Uhr

Telefon (08071) 922860
Fax (08071) 8150
Sauerstoff@reisebuero-am-marienplatz.de
www.reisebuero-am-marienplatz.de

*Bitte kontaktieren Sie unser Reisebüro bei Inlandsreisen
mindestens 2 Wochen vor Reiseantritt, bei Auslandsreisen
4-6 Wochen vor Abreise.*



Das Team des Reisebüros am Marienplatz.
(Quelle: Reisebüro am Marienplatz)

Kundenservice-Center Sauerstoff

Sie erreichen unseren Linde Healthcare Kundenservice

Montag – Donnerstag	7.30 – 17.30 Uhr
Freitag	7.30 – 16.30 Uhr

Telefon (089) 37000-300
Fax (089) 37000-37300
www.linde-healthcare.de

Individuelle Reisebetreuung

Wir kümmern uns darum, dass Ihre Versorgung genau so gut und bequem läuft wie zu Hause.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Auswahl des optimalen Reiseziels sowie bei der Hotelwahl.

Planen Sie ein Gruppenevent oder eine Gruppenreise, zum Beispiel mit Ihrer Lungensportgruppe oder Selbsthilfegruppe, kümmern wir uns gerne um die Organisation.

Über Linde Gas Therapeutics GmbH, Linde Healthcare.

Linde Gas Therapeutics GmbH ist einer der führenden Anbieter in der Respiratorik für die Arzneimittelversorgung mit Gasen, den dazugehörigen Medizinprodukten und für die aktive Betreuung beatmungspflichtiger Patienten in Deutschland. In allen Bereichen stehen Sicherheit, Qualität und Innovation der Therapien und Dienstleistungen im Vordergrund. Die Geschäftseinheit in Deutschland umfasst rund 400 Mitarbeiter für den Arzneimittel- und Medizinprodukteverkauf sowie die Patientenversorgung zu Hause.

Linde Gas Therapeutics GmbH ist eine Konzerngesellschaft der Linde GmbH. Wenn in der Broschüre von „Linde“ gesprochen wird, wird damit auf die Linde Gas Therapeutics GmbH referenziert.

Weitere Informationen unter www.linde-healthcare.de.

Unser Webshop ist unter www.linde-elementar.de für Sie online.

CONOXIA® GO₂X, CONOXIA® LO₂X, CONOXIA® MO₂X

Wirkstoff: Sauerstoff. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung und Vorbeugung von Sauerstoffmangelzuständen (hypoxischen und hypoxämischen Zuständen) **CONOXIA® GO₂X** zusätzlich: Zur Behandlung von Clusterkopfschmerzen. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

Linde Gas Therapeutics GmbH, Mittenheimer Str. 62, 85764 Oberschleißheim
Stand 11/2020

Linde Gas Therapeutics GmbH

Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim
Telefon (089) 37000-300, Fax (089) 37000-37300, www.linde-healthcare.de