



Nachbefüllung des Perlanfeuchters.

Zur Nachbefüllung immer den ganzen Perlanfeuchter an der oberen Flügelschraube abschrauben!



Wenn der Becher abgeschraubt wird, kann es passieren, dass beim späteren Anschrauben das Gewinde schief aufgedreht wird. Dies hat zur Folge, dass zu wenig Sauerstoff aus der Entnahmeöffnung kommt.

1. die Schlauchverbindung am Luftbefeuchter lösen
2. den ganzen Luftbefeuchter an der Flügelschraube wegschrauben
3. den Luftbefeuchterdeckel abschrauben
4. den Perlanfeuchter vollständig entleeren
5. mit frischem Wasser spülen
6. den Perlanfeuchter mit gekochtem Wasser neu befüllen
7. den Perlanfeuchterdeckel wieder **langsam und gerade** festschrauben
8. den Perlanfeuchter wieder an dem Sauerstoffbehälter befestigen
9. die Schlauchverbindung wieder herstellen (Nasenbrille anstecken)

Vorsicht:

Bei einem falsch verschraubten Becher entweicht der Sauerstoff am oberen Gewinde!

Das Leitungswasser muss jeden Tag neu abgekocht und neu eingefüllt werden. Abgekochtes Wasser auf Raumtemperatur abkühlen lassen, dann einfüllen.

Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung des Bechers mit z. B. abgekochtem Wasser.

Ein Service der Linde Healthcare

Linde Gas Therapeutics GmbH, Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim
Telefon 089.37000-300, Fax 089.37000-37300, www.linde-healthcare.de