




Füllanleitung mobiler LOX-Tragegeräte für die Verwendung zu Hause.



Nicht rauchen!



Keine offenen
Flammen.

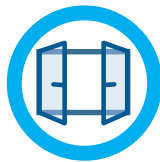

Auf gute
Belüftung
achten.



Cremes, Fette und
Öle vom System
fernhalten.



Auf trockene
Füllanschlüsse
achten.

1. Vor dem Füllen



Trocknen Sie den Füllanschluss des Tragegerätes mit Küchenpapier ab, indem Sie dieses fingerdick zusammengerollt in das Füllloch stecken und drehend wieder herausziehen.

Die Füllanschlüsse müssen trocken sein, da Tragegerät und stationärer Behälter durch Feuchtigkeit aneinander festfrieren können und tiefkalter Sauerstoff austreten kann.

2. Befüllung



- Setzen Sie das Tragegerät auf und drücken Sie es ca. 1 cm nach unten.
- Halten Sie das Gerät in dieser Position und ziehen Sie zum Befüllen die Klappe an der Rückseite des Tragegeräts.
- Lassen Sie die Klappe alle 30 Sekunden zurückschlagen, damit Eiskristalle weggeschleudert werden.
- Öffnen Sie danach die Klappe wieder, um mit der Befüllung fortzufahren.

Bitte immer den Füllvorgang komplett abschließen und nicht mehrmals in kurzen Abständen hintereinander füllen.




Füllanleitung mobiler LOX-Tragegeräte für die Verwendung zu Hause.



Nicht rauchen!



Keine offenen
Flammen.

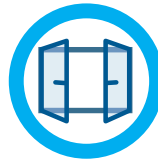

Auf gute
Belüftung
achten.




Cremes, Fette und
Öle vom System
fernhalten.



Auf trockene
Füllanschlüsse
achten.

3. Ende des Füllvorgangs

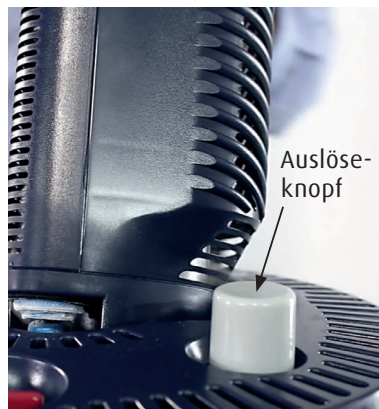

- Sobald das Tragegerät vollständig befüllt ist, ändert sich das Strömungsgeräusch deutlich und es tritt stoßweiße Sauerstoffdampf aus.
- Lassen Sie die Klappe wieder zurückfallen und ziehen Sie das Tragegerät am Trageriemen gerade nach oben ab.
- Bei einigen Geräten kann hierfür ein Auslöseknopf gedrückt werden.
- Wenn sich die Geräte nicht voneinander trennen lassen, kann es sein, dass sie aneinander festgefroren sind. Warten Sie in diesem Fall 15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

Nach der Befüllung kann es bis zu einer Stunde dauern, bis der Betriebsdruck im Tragegerät wieder vollständig aufgebaut ist und das Gerät den eingestellten Sauerstoff abgibt.

4. Inbetriebnahme



- Kontrollieren Sie den Füllstand, indem Sie das Gerät am Trageriemen hochheben (nahe der Anzeige).
- Der Füllstand wird über eine Waage ermittelt. Bei einigen Geräten ist eine externe Waage vorhanden.
- Stecken Sie den Nasenbrillenschlauch auf den dafür vorgesehenen Adapter.

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen aus der Bedienungsanleitung.